

# POKYNY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ DENTÁLNÍ NÁSTROJŮ – LM DENTAL

## 1. PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE

*NENECHÁVEJTE ŠPINAVÉ NÁSTROJE SUCHÉ - CO NEJDŘÍVE JE VLOŽTE DO DEZINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU. VĚNUJTE POZORNOST SPRÁVNÉMU DÁVKOVÁNÍ A ČASŮM PŮSOBENÍ. POUŽÍVÁTE-LI TERMODISINFEKTOR, PŘESKOČTE SERVISNÍ CYKLY 1-5.*

## 2. OPLÁCHNUTÍ

*DENTÁLNÍ NÁSTROJE DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE POD TEPLOU TEKOUcí VODOU.*

## 3. ČIŠTĚNÍ

*RUČNÍ MYTÍ: ODSTRAŇTE VŠECHNY VIDITELNÉ NEČISTOTY TEPLOU VODOU. POUŽÍVEJTE MĚKKÝ KARTÁČ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK*

*ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA: POUŽÍVEJTE KAZETY NA NÁSTROJE, ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ*

## 4. PROPLÁCHNUTÍ

*PŘÍSTROJE DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE POD TEPLOU TEKOUcí VODOU.*

## 5. SUŠENÍ

*PŘED STERILIZACÍ CHIRURGICKÉ NÁSTROJE DŮKLADNĚ OSUŠTE*

## 6. KONTROLA A OSTŘENÍ

*PROVEĎTE KONTROLU NÁSTROJŮ, NAOŠTŘETE, OPRAVTE NEBO VYMĚŇTE NÁSTROJE, JE-LI TO NUTNÉ*

## 7. BALENÍ

*PRO STERILIZACI OŠETŘENÉ A VYČIŠTĚNÉ NÁSTROJE ZABALTE*

## 8. STERILIZACE

*V AUTOKLÁVU: DO AUTOKLÁVU VLOŽTE ČISTÉ, SUCHÉ A SPRÁVNĚ ZABALENÉ PŘÍSTROJE.*

*HORKOVZDUŠNÁ STERILIZACE: DO HORKOVZDUŠNÉHO STERILIZÁTORU VLOŽTE ČISTÉ, SUCHÉ A SPRÁVNĚ ZABALENÉ PŘÍSTROJE, NEVKLÁDEJTE JE PŘÍLIŠ NATĚSNANÉ NA SOBĚ. ZAJISTĚTE, ABY TEPLOTA BYLA SPRÁVNÁ (MAX. 180 ° C / 355 ° F).*

*UPOZORNĚNÍ LM EXTRAČNÍ NÁSTROJE STERILIZUJTE PŘI NIŽŠÍ TEPLOTĚ - MAXIMÁLNĚ 134 ° C / 273 ° F.*

### DŮLEŽITÉ!

*PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE A OŠETŘUJTE VAŠE DENTÁLNÍ NÁSTROJE*

*POSTUPUJTE PODLE VŠECH POKYNŮ VÝROBCE*

*ZVLÁŠTNÍ POZORNOST VĚNUJTE SPRÁVNÉMU DÁVKOVÁNÍ A PŮSOBENÍ ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ.*